



whitiness HP AutoMixx
Concentrado dental para uso en consultorio
Peróxido de hidrógeno al 35%
Adaptado dental para consumidor

35%

whitiness HP AutoMixx

Blanqueamiento de clínica en base a peróxido de hidrógeno al 35%



SISTEMA DE AUTOMEZCLA PARA PRACTICIDAD PLENA EN EL BLANQUEAMIENTO DENTAL.

Consultar las instrucciones de uso

Whiteness HP AutoMixx es un blanqueamiento a base de peróxido de hidrógeno al 35% para blanqueamiento de dientes vitales. Se debe utilizar exclusivamente en la clínica, siempre con el uso de un eficiente aislamiento para la protección de los tejidos intraorales. El gel blanqueador se presenta en jeringas de cuerpo doble, donde están contenidos el peróxido y el espesante en compartimientos distintos. A través de una punta de automezcla, las fases son mezcladas enseguida que salen de la jeringa, dejando el producto homogéneo y listo para aplicación directa en los dientes evitando la mezcla manual.

PRACTICIDAD: AUTO-MIXING SYSTEM DOUBLE-BODY SYRINGE



Las fases son mezcladas a través de la punta de automezcla y el producto sale homogéneo y listo para uso, evitando la manipulación manual.



NO SE NECESITA LUZ:

No es necesario el uso de fuentes de luz aceleradoras (sistemas de LED, láseres de alta potencia y otros).



PRESENCIA DE CALCIO:

Vislumbrando contribuir con el mantenimiento de la integridad del esmalte dental cuando éste es blanqueado, se añadió a la formulación una fuente de calcio soluble en el gel. Estudios demuestran que la presencia de calcio en el blanqueamiento contribuye significativamente en preservar la microdureza del esmalte, fenómeno siempre observado cuando se hace blanqueamiento dental.



RENDIMIENTO:

Rinde hasta 4 aplicaciones completas (línea de la sonrisa, ambas arcadas).



AHORRO:

El contenido restante puede ser almacenado y usado posteriormente.



CON BLOQUEADOR DE CALOR:

Para cuando el profesional desee utilizar alguna fuente de luz, el bloqueador de calor impide que el calor emitido por esas fuentes dañe la pulpa, previniendo la hipersensibilidad.



NO CAMBIA EL COLOR:

El producto posee coloración verde-azulada y no altera su color a lo largo del proceso facilitando el control visual.



APLICACIÓN ÚNICA POR SESIÓN:

El producto puede ser mantenido por hasta 50 minutos en contacto con los dientes sin necesidad de cambio pues el pH se mantiene neutro y estable por toda la sesión.



GEL DE VISCOSIDAD ADECUADA Y AGRADABLE.



BLANQUEAMIENTO DE CLÍNICA PRÁCTICO Y EFICAZ

Bruno Lippmann

Especialista en Ortodoncia - Thum. Instituto de Posgraduación e Investigación Biológica, Joinville-SC

Rafaella Ronchi Zinelli


Especialista en Endodoncia- Thum. Instituto de Posgraduación e Investigación Biológica, Joinville-SC



Antes



Antes

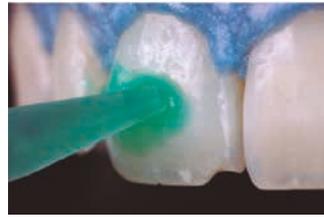

Whiteness HP AutoMixx no necesita la mezcla manual. El producto es mezclado a través de una punta de automezcla que es acoplada a la jeringa de cuerpo doble donde están el peróxido y el espesante en compartimentos distintos. Una pequeña cantidad de gel deberá ser dispensada en un recipiente antes de aplicar el producto en los dientes del paciente. Eso asegura que el producto aplicado estará correctamente homogeneizado (sangrado de la jeringa en su primer uso).



Después



Después



Antes



Después

¡ESTA SONRISA ES WHITENESS!

Conforme evaluación del profesional, el tratamiento blanqueador fue realizado por la técnica combinada: Whiteness HP Automixx en la clínica y White Class para las sesiones en casa. HP Automixx posibilita el uso de una aplicación única de hasta 50 minutos en contacto con los dientes sin necesidad de cambiarlo. Entre sus beneficios destacamos la presencia de calcio y bloqueador de calor.

Beneficios del producto

- **Aplicación única por sesión:** El producto puede ser mantenido por hasta 50 minutos en contacto con los dientes sin necesidad de cambio pues el pH se mantiene neutro y estable por toda la sesión.
- **Practicidad:** Las fases son mezcladas a través de la punta de automezcla y el producto sale listo para uso.
- **Ahorro:** El contenido restante puede ser almacenado y usado posteriormente.
- **Presencia de calcio:** Contribuye significativamente en la reducción de la microdureza del esmalte, manteniendo la integridad del esmalte dental.
- **No cambia el color:** El producto posee coloración verde-azulada y no altera su color a lo largo del proceso facilitando el control visual.
- **Contiene bloqueador de calor:** Para cuando el profesional desee utilizar alguna fuente de luz (lámpara de blanqueamiento) el bloqueador de calor impide que el calor emitido por esas fuentes dañe la pulpa, previniendo la hipersensibilidad.
- **Con el Neutralize:** Conseguirá neutralizar la acción del peróxido de hidrógeno en contacto con el tejido blando.

Neutralizador de peróxido de hidrógeno. Seguridad en la clínica

En los kits para blanqueamiento en clínica, FGM ofrece un producto llamado Neutralize. Se trata de la suspensión de la enzima Catalasa, cuya función es catalizar la descomposición del peróxido de hidrógeno y neutraliza su acción en eventual contacto con tejidos blandos durante la sesión de blanqueamiento. Es importante observar que este producto debe ser aplicado a la mucosa tan pronto se percibe el contacto indebido con el gel blanqueador.

Formatos de Venta

Kit de 5g de HP automix 35%

Contenido:

- 1 jeringa de Whiteness HP Automixx con 5g
- 5 puntas de automezcla.
- 1 jeringa de Top dam con 2g.
- 1 frasco de solución Neutralize con 2g (neutralizador de peróxido)

Refill 2g de HP automix 35%

¡Disponible Próximamente!

Contenido:

- 1 jeringa de cuerpo doble con 2g de gel
- 1 Top dam con 2g
- Puntas de automezcla.

Ofertas del producto

REF.	DESCRIPCIÓN	P.V.P.	OFERTA
232572	KIT DE BLANQUEAMIENTO WHITENESS HP PER HIDRÓGENO 35% AUTOMIXX KIT 5G	69,00 €	2 + 1 46,00 €

Validez de la oferta, desde el 10 de enero al 15 de marzo de 2022.



whiteness HP AutoMixx