

EN In-office whitening: practicality in application and excellence in results

ES Blanqueamiento en consultorio: practicidad en la aplicación y excelencia en los resultados

Author/Autor: Prof. Dr. Albano Luis Bueno



Brazil | Brasil



Initial | Inicial



Final

36-years-old female patient.

COMPLAINT

Yellowish teeth.

Paciente del sexo femenino, 36 años.

QUEJA

Dientes amarillados.

EN CLINICAL/RADIOGRAPHIC EXAM

Healthy vital teeth with an initial shade close to A3.

ES EXAMEN CLÍNICO/RADIOGRÁFICO

Dientes vitales saludables mostrando coloración inicial próxima al A3.

TREATMENT

Two in-office whitening sessions were performed with Whiteness HP AutoMixx (hydrogen peroxide at 35%), which has a double-body syringe that favors the agility of the treatment.

TRATAMIENTO

Se realizaron 2 sesiones de blanqueamiento en consultorio con Whiteness HP AutoMixx (peróxido de hidrógeno al 35%) que tiene jeringa de cuerpo doble, lo que favorece la agilidad de la consulta.

// Whiteness HP AutoMixx came to make our procedure easier. The mixing tip is wonderful, dispensing product manipulation before the procedure, besides that, it is very easy to apply. //

Prof. Dr. Alberto Luis Bueno

// El blanqueador Whiteness HP AutoMixx vino para facilitar nuestro procedimiento, la puntera mezcladora es sensacional, dispensando la manipulación del producto antes del procedimiento, además de la fácil aplicación. //

Prof. Dr. Albano Luis Bueno

STEP BY STEP | PASO A PASO



1 and 2. Intial pictures.
1 y 2. Fotos iniciales.



3 to 5. Top dam gingival barrier applied to protect the marginal gingiva.
3 a 5. Aplicación de la barrera gingival Top dam protegiendo la encía marginal.



6 and 7. The gel is applied directly from the syringe to the teeth. It must remain for 40 minutes without being exchanged.

6 y 7. El gel es aplicado directamente de la jeringa en los dientes y debe ser mantenido por 40 minutos sin ser cambiado.



8. After 40 minutes, the gel is removed by suction.

8. Después de 40 minutos, el gel se remueve por succión.



9 and 10. Whitened teeth after 2 sessions with shade close to B1.

9 y 10. Dientes blanqueados luego de 2 sesiones, exhibiendo color similar al B1.

FGM MATERIALS USED | MATERIALES FGM UTILIZADOS

IN-OFFICE WHITENING GEL
(HYDROGEN PEROXIDE)
Whiteness HP AutoMixx

BLANQUEADOR PARA CONSULTORIO
(PERÓXIDO DE HIDRÓGENO)
Whiteness HP AutoMixx

LIGHT-CURING
GINGIVAL BARRIER
Top dam

BARRERA GINGIVAL FOTOCURABLE
Top dam

LIP RETRACTOR
Arcflex

RETRACTOR LABIAL
Arcflex



Whiteness Moment

whiteness HP AutoMixx
35%
Gel dental para blanqueamiento. Fórmula remineralizante. Excelente viscosidad. Rinde hasta 4 aplicaciones por sesión.

THE MOST COMPLETE WHITENING GEL

EL BLANQUEADOR MÁS COMPLETO

- Automix system**
Sistema automix
- Single application per session**
Aplicación única por sesión
- Heat blocker**
Bloqueador de calor
- Remineralizing formula**
Fórmula remineralizante
- Excellent viscosity**
Excelente viscosidad
- Yields up to 4 applications**
Rinde hasta 4 aplicaciones

FGM